

Манжета с трубками соединительными
к медицинскому изделию «Прибор для
измерения артериального давления, модели:
UA-100, UA-100 SL, UA-100 Эконом»

A&D
Эй энд Ди, Япония

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Японская компания A&D Company, Ltd. (Эй энд Ди Компани, Лимитед) благодарит Вас за покупку манжеты с трубками соединительными к медицинскому изделию «Прибор для измерения артериального давления», обеспечивающей безболезненное измерение артериального давления. Мы уверены, что, оценив качество, надежность и достоинства манжеты с трубками соединительными, Вы останетесь постоянным пользователем нашей продукции.

Область применения


Манжета с трубками соединительными предназначена для использования с приборами для измерения артериального давления моделей UA-100, UA-100 SL, UA-100 Эконом.

Комплектация

1. Манжета с трубками соединительными.
2. Руководство по эксплуатации.
3. Коробка упаковочная картонная.
4. Гарантийная карта.

Выбор правильного размера манжеты

Использование манжеты с трубками соединительными, не соответствующей размеру руки пользователя, искажает результат измерения артериального давления. Если манжета с трубками соединительными мала, результат измерения может быть завышен, если велика – может быть занижен. Измерьте окружность Вашей руки и выберите соответствующий тип манжеты с трубками соединительными.

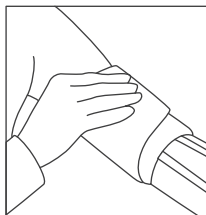

Малая	18-22 см	S*
Стандартная	22-32 см	M
Стандартная	23-37 см	SL
Большая	32-45 см	L

* Буквенные обозначения манжет представлены в качестве информации и не являются обязательными.

Хранение и уход

- Избегайте сильного сворачивания манжеты и скручивания соединительных трубок.
 - Оберегайте манжету и соединительные трубки от острых предметов.
 - Никогда не используйте спирт, бензин, растворитель или другие агрессивные химикаты для чистки манжеты с трубками соединительными.
 - Дезинфекцию манжеты с трубками соединительными необходимо проводить мягким ватным тампоном (или мягкой тряпочкой) с использованием 3% раствора перекиси водорода или с использованием 3% раствора перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора нейтрального моющего средства.
- Стерилизация манжеты с трубками соединительными не предусмотрена.

Условия эксплуатации

Температура	от +10 °С до + 40 °С
Влажность	не более 85%

Условия хранения

Температура	от -20 °С до + 60 °С
Влажность	не более 95%

Условия транспортирования

Температура	от -20 °С до + 60 °С
Влажность	от 10% до 95%

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации манжеты с трубками соединительными – 1 год.

Срок службы манжеты с трубками соединительными – 2 года.

В случае обнаружения производственного дефекта покупателю гарантируется бесплатный ремонт или замена манжеты с трубками соединительными в течение всего гарантийного срока в Сервисном центре ООО «Эй энд Ди РУС». Полный список адресов сервисных центров уточняйте на сайте: www.and-rus.ru/service/address.

Гарантийные обязательства действительны только при соблюдении правил эксплуатации.

По окончании срока службы подлежит отдельной утилизации. Не уничтожайте вместе с неотсортированными бытовыми отходами.

Манжета с трубками соединительными для медицинского изделия «Прибор для измерения артериального давления».

Регистрационное удостоверение: №РЗН 2016/3556 от 13.05.2022 г.

Номер лота продукции соответствует дате производства и указан на упаковке. Не является медицинским изделием.

Производитель:

“Эй энд Ди Компани, Лимитед”, Япония, A&D Company, Limited, 3-23-14, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 170-0013, Japan / “Эй энд Ди Компани, Лимитед”, 3-23-14, Хигаши-Икебукуро, Тошима-ку, Токио, 170-0013, Япония.

Место производства:

1. A&D Company, Limited (Эй энд Ди Компани, Лимитед), 1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama-ken, 364-8585, Japan (1-243 Асахи, Китамото-ши, Сайтама-кен, 364-8585, Япония).

2. Shanghai Caremate Medical Device Co., Ltd., Building 4, №281 HongAn Road, Zhujing Town, Jinshan, 201503 Shanghai, P.R. China / Шанхай Кэармейт Медикал Девайс, Ко., Лтд., Билдинг 4, №281 ХонгАн Род, Чжуцзин Таун, Цзиньшань, 201503 Шанхай, Китай.

3. Wenzhou Bokang Instruments Co., Ltd., No. 1500 Haining Road Haibin, Longwan, Wenzhou, 325024, Zhejiang, P.R. China / Вензоу Боканг Инструментс Ко., Лтд., Но 1500 Хайнинг Роуд, Хайбин, Лонгван, Вензоу, 325024 Чжэцзян, Китай.

4. A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd., 1-5/F, Building #4, Hengchangrong High Tech Industry Park, Shangnan East Road, Hongtian, Shajing, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, 518125, P.R. China / Эй энд Ди Электроникс (Шеньжень) Ко., Лтд., 1-5/Ф, Билдинг №4, Хенгчанронг Хай Тек Индастри Парк, Шангнан Ист Роад, Хонгтиан, Шажинг, Бао'ан Дистрикт, Шеньжень, Гуангдонг, 518125, Китай.

Импортер:

ООО «Эй энд Ди РУС», РФ, 117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 6, комн. 8Б.

Бесплатный телефон горячей линии: **8 800 200-03-80.**

Отзывы и предложения оставляйте на www.and-rus.ru

Сделано в Китае.